


mabs[®] bomullsslang

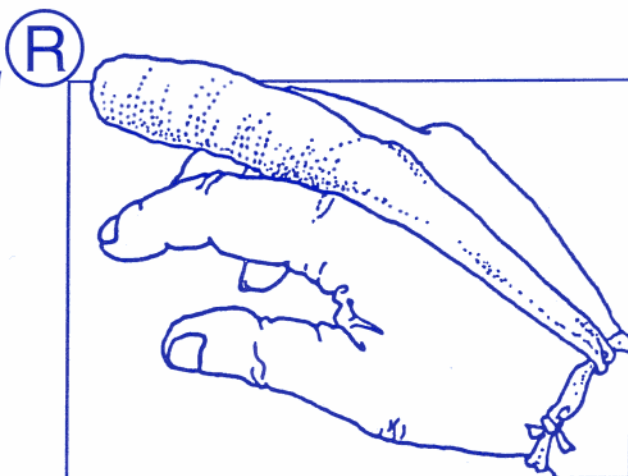


100 procent oblekt bomull i rullar à 20 meter


Artikelnr	Bredd	Max töjning	Avsedd för fixering och skydd av skada på:
4716-01	15 mm	60 mm	Fingrar och tår
4716-02	20 mm	85 mm	Fingrar och tår med t.ex. innerförband
4716-04	34 mm	140 mm	Händer och armar
4716-05	60 mm	210 mm	Armar och smala ben
4716-07	80 mm	290 mm	Ben med större omfång
4716-09	110 mm	420 mm	Kropps- och huvudförband
4716-15	150 mm	660 mm	Kroppsförband

CE


INSTRUKTION Läggt t.ex. fingerförband (artikelnummer 4716-01) så här:

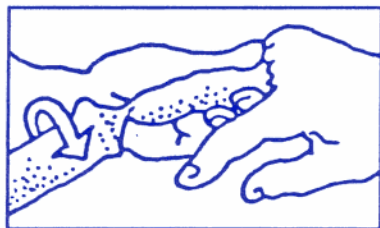


1. Läggt sterilförband på såret. Trä fingerförbandet över applikatorn och trä applikatorn över fingret.

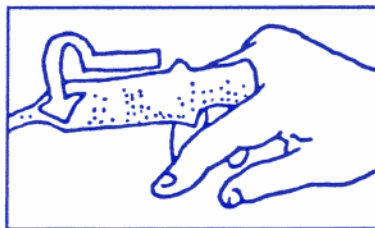

2. Håll fast förbandet, dra upp applikatorn över fingertoppen, snurra.

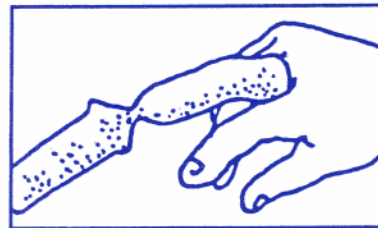


3. För ned applikatorn igen så att förbandet blir dubbelt.

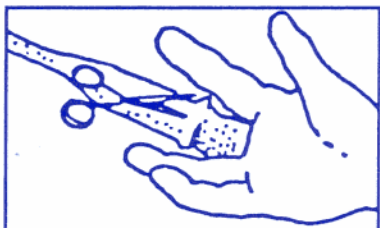

4. Klipp en öppning på fingrets insida. Dra bort applikatorn. Stick ut fingret.



5. Sträck förbandet på handens ovansida ner mot handleden. Klipp upp om övre lagret stramar.

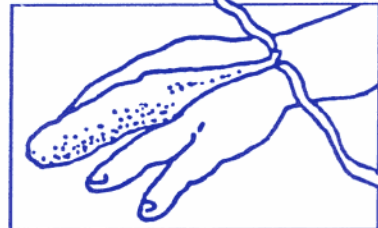

6. Klipp rakt igenom det dubbla förbandet till två lagom långa knyttförband för handleden.

mabs[®] *int ab*

Finspångsvägen 512 • 605 98 Norrköping • Telefon 011-33 00 04 eller 33 00 05 • Telefax 011-33 00 02